



檢 驗 科 公 告

淡水 台北 新竹 台東

2020/06/29

公告項目：



Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae 核酸定性檢測委
外單位異動

執行日期：2020/07/01

公告對象：各科醫師、護理部、檢驗科

說明：

1. Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae 核酸定性檢
測，自 2020/07/01 改由聯合醫事檢驗所執行，故變更相關內容。
2. 採檢容器：

檢體類別	生殖道檢體	尿液
容器名稱	專用採檢 swab (請至細菌組領取)	無菌試管
容器圖示		
傳送保存	2~30°C 下運送與儲存。	2~30°C 下運送與儲存。
檢體量	N/A	10 mL(最少 3 mL)
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 男性病患及懷孕的女性病患建議使用尿液做為檢體。 2. 檢體分析是一次性，不進行原管複驗。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收集前段尿液。 2. 採集尿液檢體前，至少要兩個小時不排尿。 3. 女性採檢前切勿清潔私密處，請直接留前段尿液。 4. 檢體分析是一次性，不進行原管複驗。



檢 驗 科 公 告

淡水 台北 新竹 台東

3. 委外項目名稱及檢驗代碼如下：

檢驗代碼	檢驗項目名稱
66975	Genital-Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae combo test 生殖道-砂眼披衣菌及淋病雙球菌核酸定性檢測
66976	Genital-Chlamydia trachomatis nucleic acid test 生殖道-砂眼披衣菌核酸定性檢測
66977	Genital-Neisseria gonorrhoeae nucleic acid test 生殖道-淋病雙球菌核酸定性檢測
66979	Urine-Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae combo test 尿液-砂眼披衣菌及淋病雙球菌核酸定性檢測
66980	Urine-Chlamydia trachomatis nucleic acid test 尿液-砂眼披衣菌核酸定性檢測
66981	Urine-Neisseria gonorrhoeae nucleic acid test 尿液-淋病雙球菌核酸定性檢測

公告製訂：醫事檢驗科細菌組組長 陳廷勻 〈分機：3025、3026〉